

PRÉLÈVEMENT SANGUIN

ORDRE DE PRÉLÈVEMENT

AIGUILLE



Citrate



SST™
Sec + gel



CAT
Sec



PST™
Héparine + gel



LH
Héparine



EDTA




Fluoré




Autres

PRÉLÈVEMENT AVEC AILETTES

AVEC HÉMOCULTURES

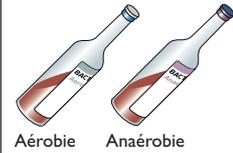

SANS HÉMOCULTURES

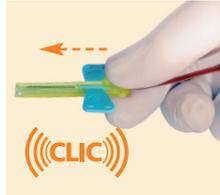

Citrate



SST™
Sec + gel



CAT
Sec



PST™
Héparine + gel



LH
Héparine



EDTA



Fluoré




Autres

Utiliser un tube de purge lors de prélèvements avec aiguille à ailettes pour permettre le bon remplissage du tube à bouchon bleu (citrate). Ne pas utiliser de tube de purge lors de prélèvement d'hémocultures.

REPLISSAGE


Veillez à remplir correctement les tubes

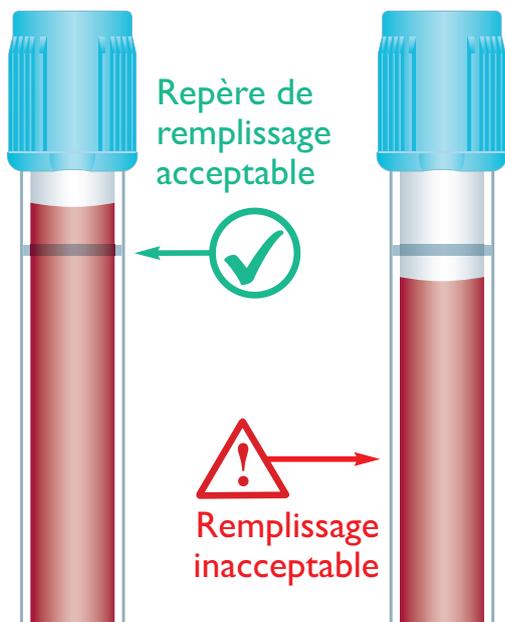

Conséquence d'un mauvais remplissage : refus de l'échantillon pour éviter un résultat erroné.

HOMOGÉNÉISATION

Veillez à homogénéiser correctement l'échantillon

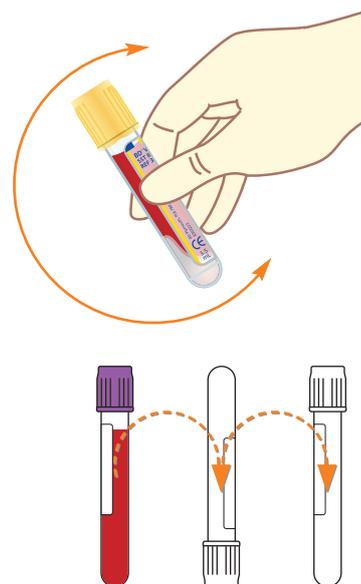

Homogénéisez les tubes par **6 à 8 retournements lents** afin de bien mélanger l'additif au sang.