

MICTION URINAIRE

RECUEIL

1

Lavez-vous les mains, puis procédez à une toilette intime minutieuse.

2




Dévissez le couvercle du pot de recueil.

3



Posez le couvercle, canule vers le haut.

4

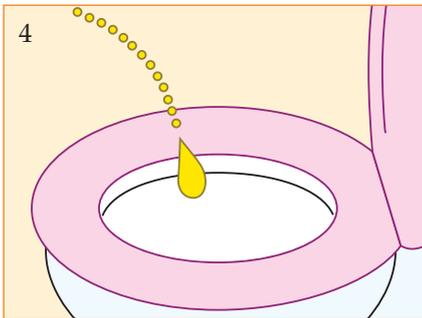

Urinez le premier jet dans le WC.

5



Poursuivez dans le pot.

6



Refermez le pot, en vissant complètement le couvercle.

TRANSFERT

1




Soulevez l'étiquette blanche et collez-la au bord du couvercle. Transférez l'urine du pot vers les tubes dans les meilleurs délais.

2



Insérez le tube en poussant à fond. Attendez la fin du remplissage avant de retirer le tube.

3

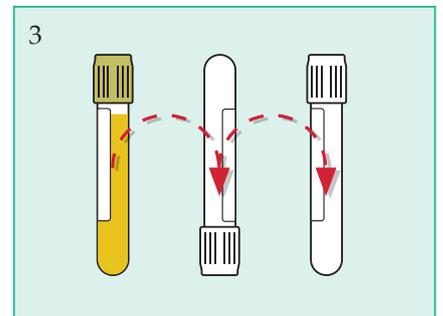


Homogénéisez le tube par 8 à 10 retournements lents (tube à bouchon kaki).

4




Remplacez l'étiquette sur l'orifice du couvercle.

5

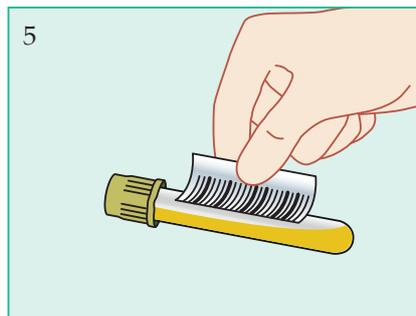

Identifiez l'échantillon.

Ordre de prélèvement des tubes :

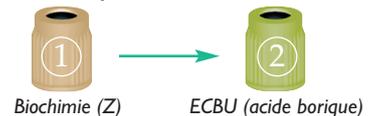

Biochimie (Z) → ECBU (acide borique)

Plus Sodi
REF 3

Min.

Respectez le niveau de remplissage minimum indiqué par un trait sur l'étiquette du tube kaki.