

Indice de révision	Nature de la modification	Date d'application
A	Création	08 décembre 2017

## 1. Objet

Information de l'équipe soignantes infirmiers(ères) (I.D.E.) et aides-soignant(e)s (A.S.) du service de réanimation – unité de soins continus.

Description du de la mise en place et utilisation du kit respiratoire chauffant et humidificateur avec **circuit monobranche RT319 (voie inspiratoire, sur Servo U)**.

## 2. Description du matériel

Circuit à changer tous les 14 jours (noter la date du prochain changement sur le circuit)




Réf. : RT319


**Présent à l'USC réserve matériel optiflow**

### 1. Montage des différentes pièces du circuit :

- Sur le réchauffeur + sur le pied à perfusion puis montage de l'ensemble

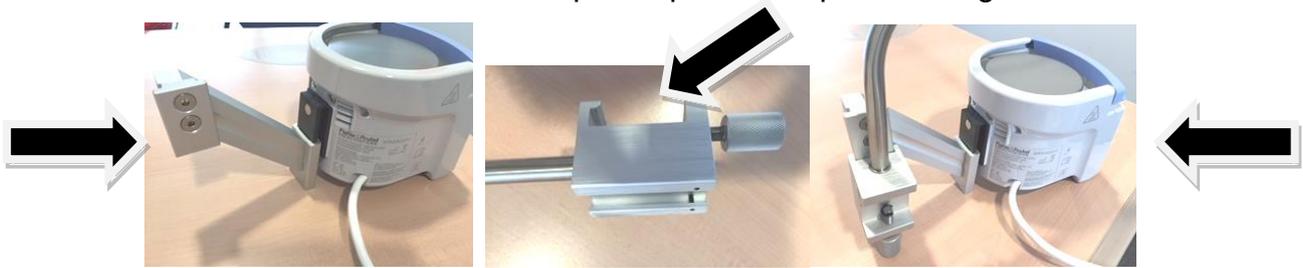

- Adapter sur le socle du respirateur, devant l'aspiration.

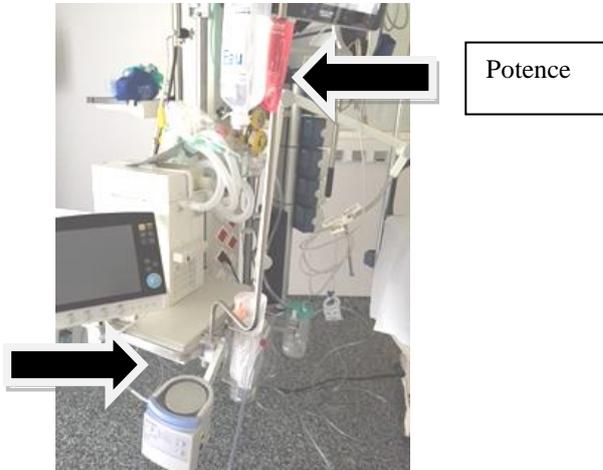

## 2. Adapter l'humidificateur sur le réchauffeur

Oter les supports bleu et blanc (fig. 1 et 2)

Brancher la tubulure à eau ppi 500ml écoflac positionné sur la potence.



## 3. Montage du circuit (Bleu) inspiratoire puis vers le patient.


## 4. Filtre du labo <sup>3</sup> sur la voie inspiratoire.







## 5. Branchement des 2 câbles

### Sonde de température


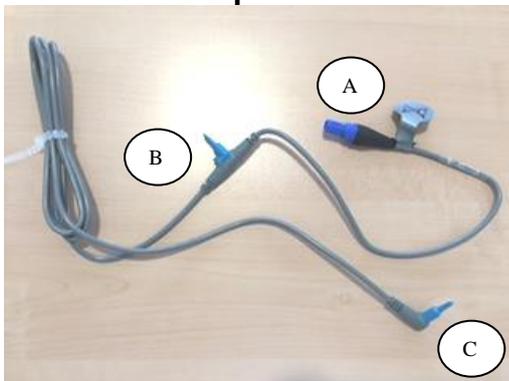


### Fil chauffant

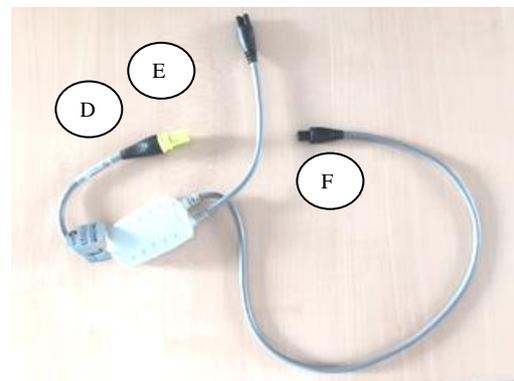

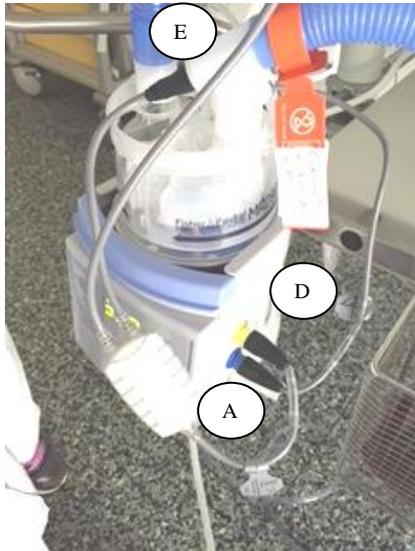


**B** Se retire en tournant ¼ de tour à G

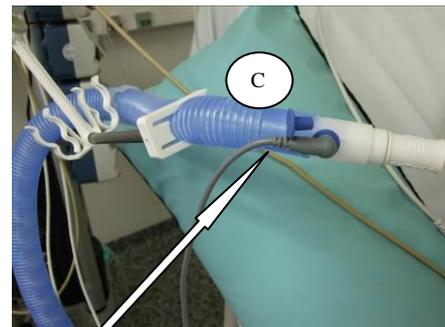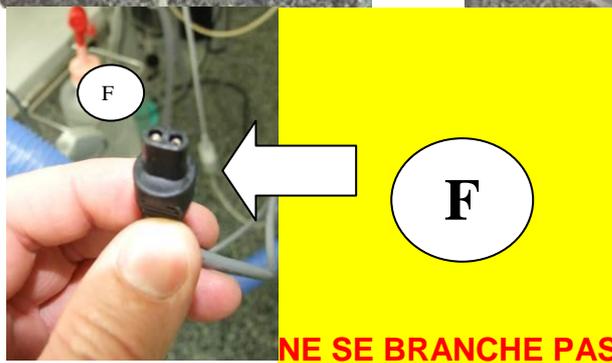

**C** A positionner sur le dessus et à bien enfoncé.

 Humidificateur positionné plus bas que le patient.  
Branche inspiratoire et expiratoire en déclive pour éviter la stase d'eau

**6. Mettre le réchauffeur en marche <sup>1</sup> et choisir intubation non invasive 34° ou VNI 31°**

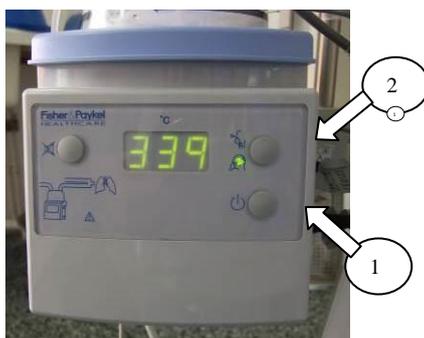


La T° ne se modifie pas, elle peut varier afin d'atteindre un ta

**7. En cas de nébulisation :**

Réanimation-USC / Procédure mise en place et utilisation montage optifl

**C**

Placer la nébulisation après le capteur et changer le filtre toutes les 48h.

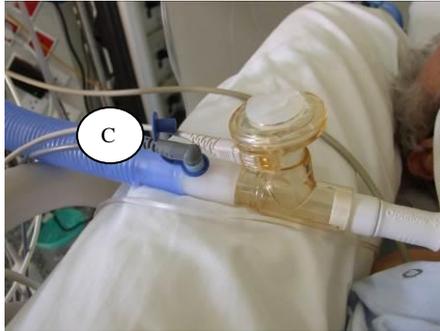

**Réf. Filtre : RT019**

**A l'issue de l'utilisation de ce kit, le matériel doit être décontaminé puis rangé dans le local matériel dans sa boîte dédiée. Si un matériel (y compris du consommable) venait à manquer ou était détérioré, merci d'en informer rapidement le cadre ou l'IDE référente.**



Rédigé par : F. HAMON	Vérifié par :	Revu par :	Validé par :
Fonctions : Cadre de Santé	Fonction :	Fonction :	Fonction :
Date : 08/12/2017	Date :	Date :	Date :