



## 1. Préparation

Préparation de la chambre d'humidification

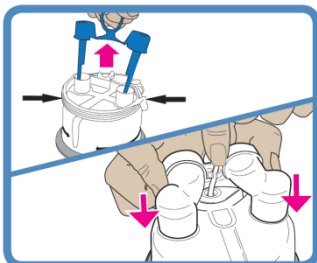


Mise en place,

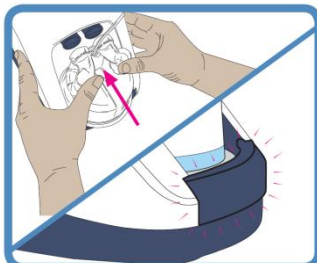


...CLIC !

Connexion à la poche d'eau

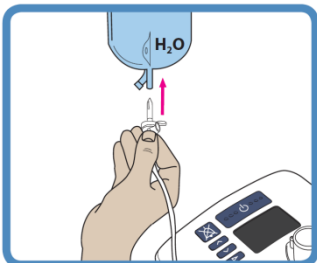

Connexion du tuyau

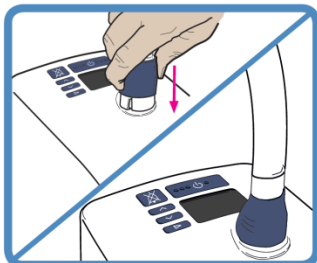

## 2. Démarrage



Appuyer 3 sec.



Feu Vert :  
Désinfection effectuée depuis la dernière utilisation.



Feu Orange :  
Désinfection NON effectuée

Cercle tournant : temps de chauffe




Accès / Sortie Mode Junior : Appuyer 5 sec.



## 3. Réglages




Affichage du réglage de température

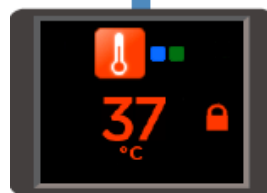

Accès au réglage : appuyer 3 sec.




Changement du réglage

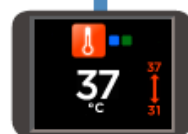

Sortie du réglage



Suivant :  
Affichage du réglage de débit patient

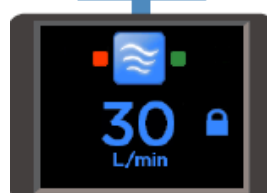

Réglage du débit patient : procéder comme ci-dessus

Le simulateur AIRVO 2 sur votre smartphone !! Chargez l'application :


<https://itunes.apple.com/us/app/airvo2/id734808115?ls=1&mt=8>

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fphcare.airvo2>


## 4. Réglage de l'oxygène



Suivant :  
Affichage  
des limites  
d'alarme  
d'oxygène

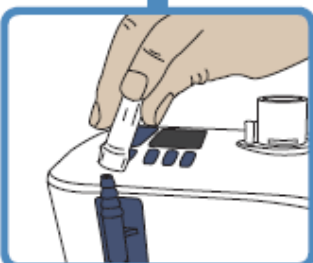


Connexion  
de l'oxygène

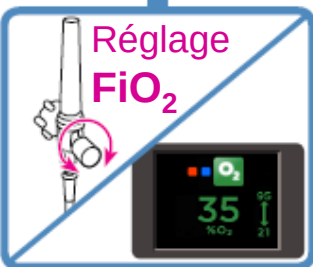

Réglage  
 $FiO_2$



Pour obtenir la  
 $FiO_2$  voulue :  
régler le débit  
d'apport d'oxygène,  
qui n'influe pas sur  
le débit patient.

NB : un changement de réglage du débit  
patient modifiera la  $FiO_2$  qui devra être  
réajustée.

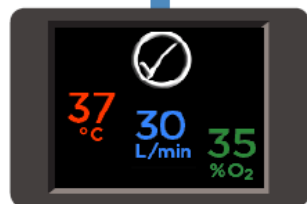

✓ Appareil  
prêt

5.  
Connexion  
et mise sur  
patient

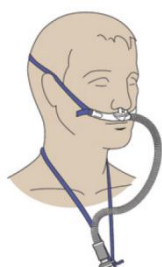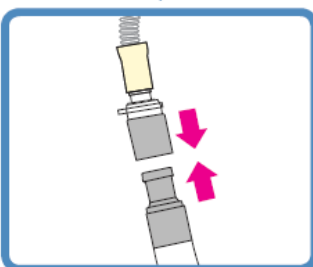

## Circuits et interfaces

| Canule nasale              | Interface de<br>trachéotomie                                                 |        |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                            |                                                                              |        |
| OPT842<br>OPT844<br>OPT846 | OPT316, OPT318<br>(Cf. « Utilisation<br>de l'AIRVO 2 » :<br>« mode Enfant ») | OPT870 |

## Réglages disponibles


|          |                                                  | °C | L/min |    |    |    |    |    |    |    |     |    |    |
|----------|--------------------------------------------------|----|-------|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|----|
|          |                                                  | 31 | 34    | 37 | 2  | 5  | 10 | 15 | 20 | 25 | ... | 55 | 60 |
| 900PT531 | OPT316<br>OPT318                                 | ●  | ●     | ●  | 2  | 5  | 10 | 15 | 20 | 25 | ... | 55 | 60 |
| 900PT501 | OPT842 (S)<br>OPT844 (M)<br>OPT846 (L)<br>OPT870 | ●  | ●     | ●  | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40  | 45 | 50 |

## 6. ARRÊT : appuyer 3 sec.



## 7. Désinfection

Désinfection  
de surface

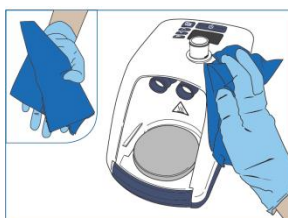

Cycle automatique

